



# VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok

A „VISUS-S látásélesség-vizsgáló lapok” című könyv olyan segédeszköz, amely a kisgyermekek látásélesség-vizsgálatához nyújt segítséget.

A látásélesség vizsgáló lapok (kártyák) gyűrűskönyvben vannak elhelyezve.

Ezek a következők:


- **Kártyasorozat** (12 db): egyik oldalukon a Kettessy-tábla egyik „Ammon” jele (villa), a hátoldalukon egy vagy több, hasonló láthatóságú ábra, az összesítő kártyán látható rajzok („óvodai jelek”) közül. A 3 m-es vizsgálati távolságú Kettessy-féle tábla „Ammon jeles” változata középső oszlopának **mindegyik jele** megtalálható a sorozatban **0,10-től 1,00 visus-értékig**. Minden kártyán jelölve van, hogy mennyi a rajta levő Ammon-jel visusértéke. *(Rendelhető „C” jeles változatban is.)*

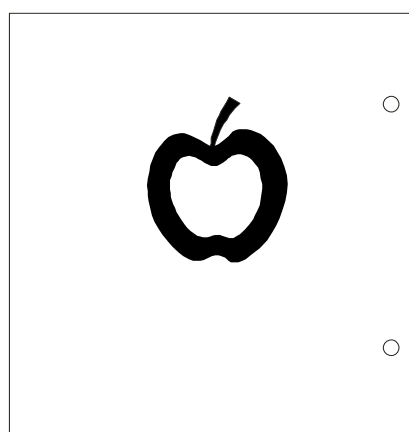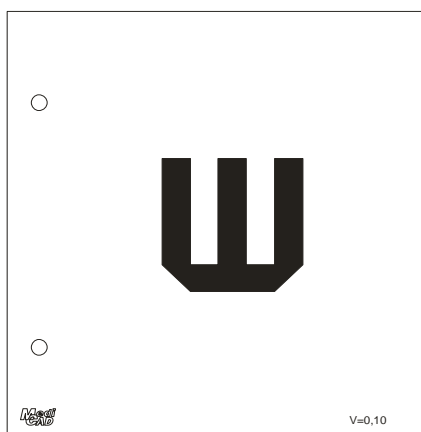

- **Összesítő kártya:** a kártyasorozat hátoldalain található rajzok láthatók rajta.



- **Segédkártya:** a szabványos „Ammon” jeles Kettessy-féle tábla kicsinyített rajzával. A lap szélén az ábrák visus-értéke is fel van tüntetve, így a vizsgálatot végző személy azonosítani tudja, hogy a kártyákon található jelek a falitáblán hol helyezkednek el.

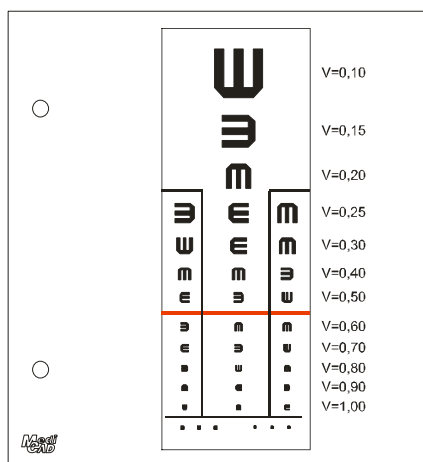

### A látásélesség-vizsgálat menete:

- A vizsgálatot jól megvilágított helyiségben kell végezni. A gyermekkel szemben nem lehet fényforrás vagy ablak.
- A kisgyermeket a vizsgálatot végző személytől 3 m-es távolságban kell leültetni. Lehetőség szerint a vizsgálatot végző is üljön. Ha a szoba megvilágítása nem megfelelő, akkor helyi fényforrást (pl. vizsgáló vagy olvasólámpa) kell a vizsgálatot végző keze felé irányítani.
- A vizsgálat során először fel kell mérni, hogy a gyermek hajlandó-e – a sorban egymás után felmutatott kártyákon – az „Ammon” jelek irányát megmutatni. (Tapasztalatok szerint a hajlandóság növelhető, ha a jeleket „robotkéznek” nevezzük, és arra kérjük a gyermeket, hogy utánozza a robotot.) Ha hajlandó erre, akkor a vizsgálat – az „Ammon” jelek csökkenő méretű sorrendben történő felmutatásával – a falitáblánál megszokott módon végezhető el.
- Ha nem tudja, vagy nem akarja megmutatni, hogy melyik irányba mutat a villa, akkor lehet a kártyák másik oldalán levő rajzokat segítségül hívni. A gyermek kezébe kell adni az „összesítő kártyát”. A gyermek vagy a felismert figura nevét mondhatja meg, vagy a kezében levő összesítő lapon megmutathatja, hogy mit lát a felmutatott kártyán. Ha ilyen módon sikerült eljutni a legkisebb felismert rajzokig, akkor érdemes megpróbálni, hogy a kártya másik oldalán levő „Ammon” jelet is felismeri-e.

Az „Ammon” jeles kártyákkal megállapított látásélesség, a 3 m-es vizsgálati távolságú fali Kettessy-féle táblákkal megegyező eredményt adhatja, mert a kártyákon és a falitáblákon levő „Ammon” jelek méretsora megegyezik.

**Ha a rajzokkal lehet csak a vizsgálatot elvégezni, akkor az eredményt csak közelítésnek szabad elfogadni, mert a rajzok láthatósága csak közelíteni tudja az „Ammon” jelekét!**